


Manuel d'utilisation

Laguna care relax

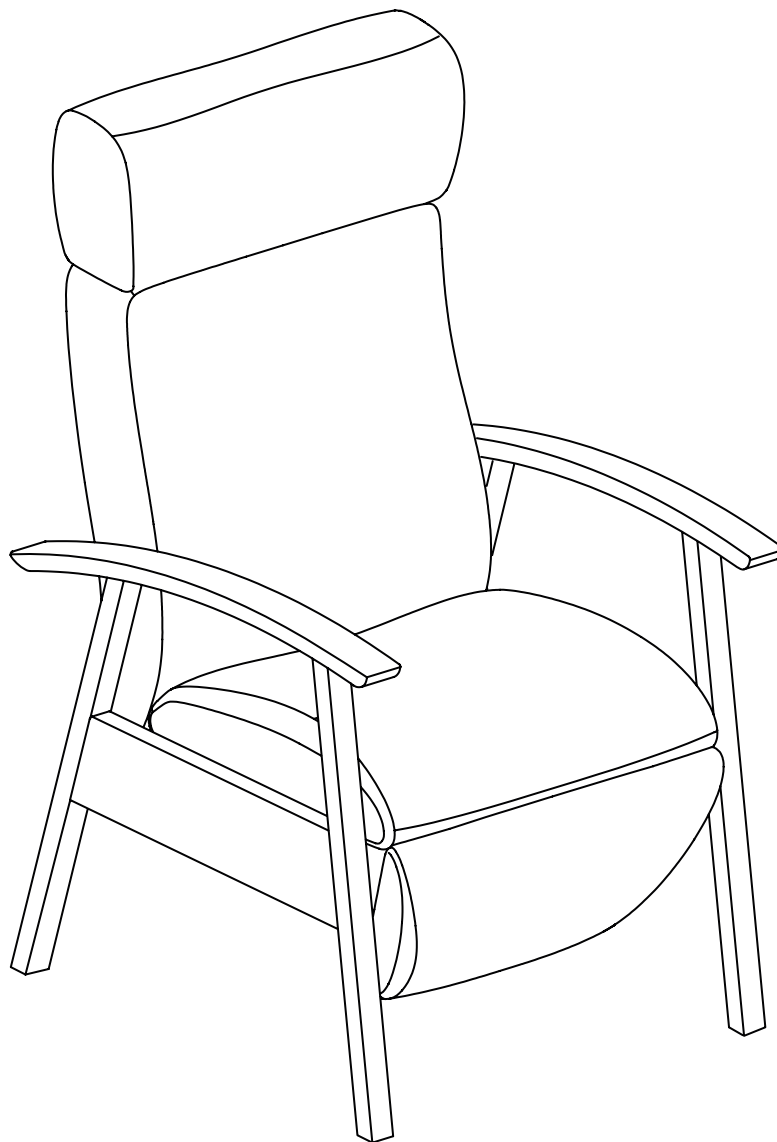

INTRODUCTION

Fauteuil relax gériatrique au niveau de finition très élevé. Grâce à son dossier préformé ergonomique, il offre un excellent confort d'assise et est idéal pour les positions assises prolongées et les personnes âgées nécessitant beaucoup de soins. Le modèle Laguna dispose de nombreuses possibilités de réglage permettant au personnel soignant ou aux proches de placer le fauteuil dans la position souhaitée, selon le niveau d'autonomie de l'utilisateur.


DÉFAUT OU DYSFUNCTIONNEMENT?

En cas de défaillance ou de panne, vous pouvez toujours contacter le service technique de Moments Furniture au +32(0)51 489 258 ou à l'adresse info@momentsfurniture.com.

BON USAGE DU RELAX


Ces instructions sont destinées à garantir le confort de tous ceux qui utilisent ce fauteuil relax.

- \\ Le fauteuil relax est conçu pour une seule personne.
- \\ Laisser suffisamment d'espace à l'avant et l'arrière du fauteuil avant de soulever le repose-jambes et de vous rabattre en arrière.
- \\ Le repose-jambes n'est pas un siège.
- \\ En cas de coincement entre des pièces mobiles, il est toujours possible d'effectuer le mouvement inverse.
- \\ Ne convient pas à un usage extérieur.
- \\ Le fauteuil relax ne constitue pas un dispositif médical.
- \\ Toujours enclencher le frein à l'arrêt.
- \\ Le niveau sonore du fauteuil relax est inférieur à 70 décibels.
- \\ Avant de quitter la Laguna, assurez-vous que l'espace sous le repose-jambes est bien dégagé, que le fauteuil soit droit et le repose-pieds est complètement rentré. (Voir les instructions d'utilisation)
- \\ Charge maximale d'utilisation (dynamique): 140 kg.
- \\ Seul un membre du personnel qualifié est autorisé à effectuer l'entretien et les réparations du mécanisme de réglage.
- \\ Déplacez toujours le fauteuil à deux personnes s'il n'est pas équipé de roues ou de roulettes.
- \\ Utilisez un seul chiffon sec pour nettoyer les composants électriques. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer les composants électriques.

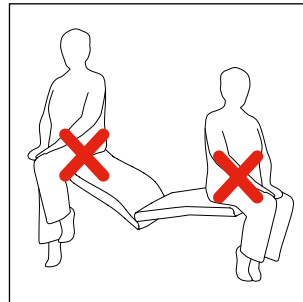

MÉCANISMES DE RÉGLAGE

QE | VERSION RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT

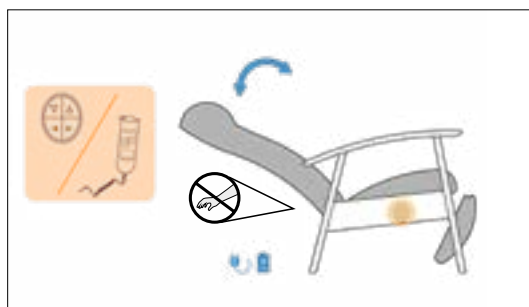

Attention !

Lors du réglage du relax par une aide, l'utilisateur doit positionner les deux bras sur le dessus de l'accoudoir.



Attention !

La batterie doit toujours être suffisamment chargée avant d'utiliser le fauteuil. Cela évite que la batterie ne se vide lorsque le fauteuil est en mode inclinaison.



Attention !

Ne placez pas de membres entre le dossier et les panneaux latéraux lorsque vous modifiez la position du dossier.

MÉCANISMES DE RÉGLAGE

QE | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Spécificités de la batterie rechargeable fixe

Control unit: Power pack (Li-Ion)
Capacity: 1800 mAh
Input voltage: 29V DC
Output voltage: 29 V DC
Max. voltage: 30 V DC
Max. output current: 5 A
Safety: overheating protection - overload protection - overload current switch-off - short-circuit proof - deep-discharge protection - acoustic warning signal
Protection degree: IP20
Relative humidity: 20% - 85%
Ambient temperatures: +10°C to +55°C
Status display: LED charge status indicator
 LED lights red: Accu is charging
 LED lights green: Accu is fully charged
 Acoustic warning signal for low charge
Certifications/approvals:
 EN 60335-1
 EN 62233
 EN 55014-1-2
Energy: 45Wh
Acoustic signal: ≤23 V
Charging time: approx. 5 - 8 h (depending on charging state)
Charging cycles: approx. 300 (depending on usage and operational conditions)

Spécificités Moteur

Motor: OKIDRIVE ES2
Output: 55W
Capacity: 1800 mAh
Input voltage: 29 V DC
Output voltage: 29 V DC


Sécurité

- ⚡ Les piles qui fuient constituent un danger pour la santé.
- ⚡ Une fuite de liquide de batterie peut endommager votre peau ou vos yeux. Le fluide est nocif s'il est touché ou avalé. Si vous entrez en contact avec le liquide de la batterie, nettoyez la zone affectée avec de l'eau et contactez un médecin.
- ⚡ Si le boîtier ou le câble sont endommagés, jetez immédiatement la batterie.
- ⚡ Ne pas ouvrir ou détruire la batterie.
- ⚡ Ne pas souder ou braser sur la batterie ou à proximité de celle-ci.
- ⚡ Éviter le contact avec l'eau.
- ⚡ N'utilisez que des chargeurs approuvés par DewertOkin.


MÉCANISMES DE RÉGLAGE

EL | COMMANDE ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE

Laguna
Schéma électrique
Jan 2023
Télécommande intégrée
AC

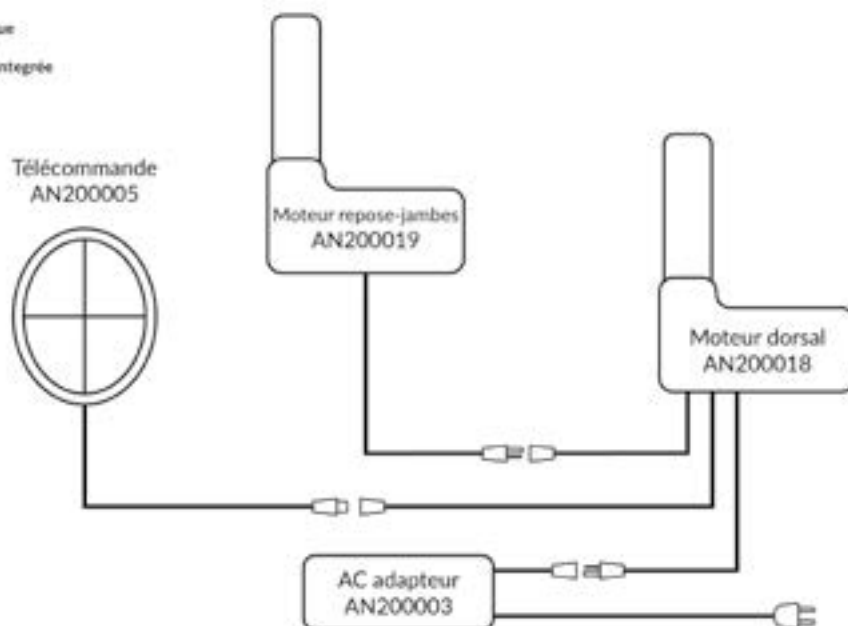




Laguna
Schéma électrique
Jan 2023
Télécommande intégrée
Batterie

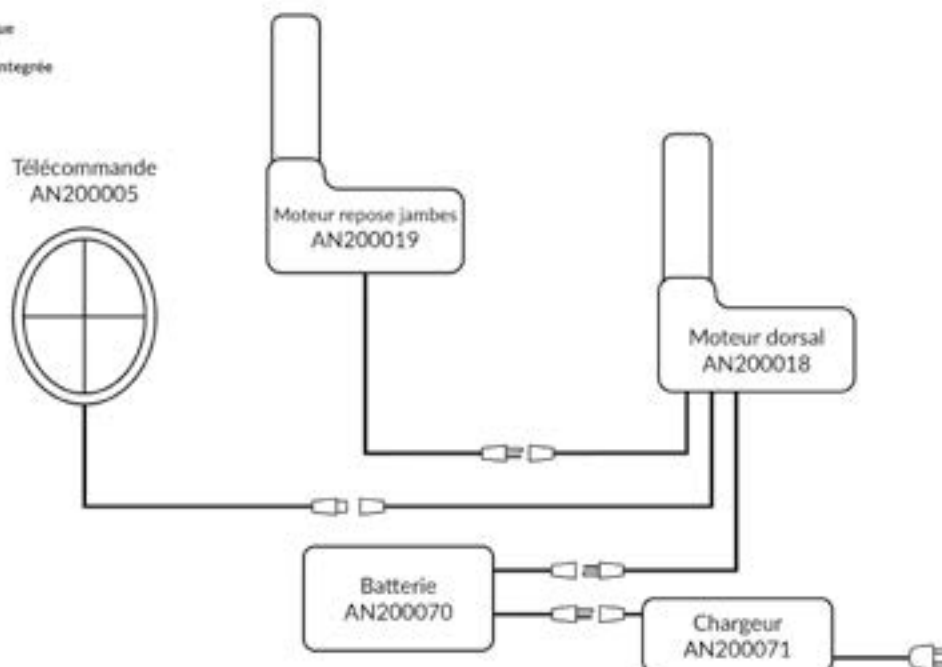

Attention !


Pour une durée de vie optimale du mécanisme de réglage électrique, utilisez les moteurs pendant un maximum de 2 minutes, suivies d'une période de repos de 18 minutes.

PIED

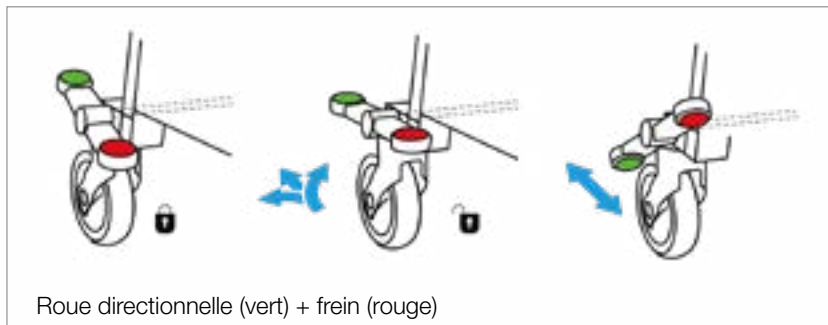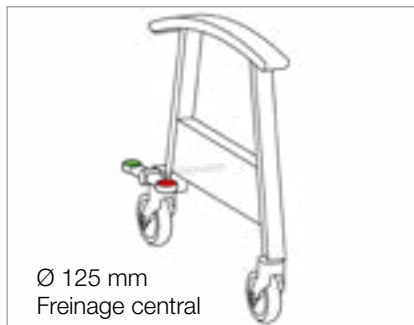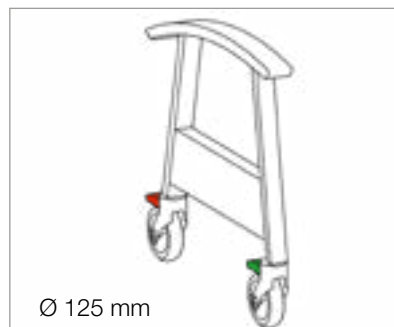


Attention !

Toujours enclencher le frein à l'arrêt afin d'éviter les déplacements imprévus. Toujours actionner le frein à l'aide du pied.

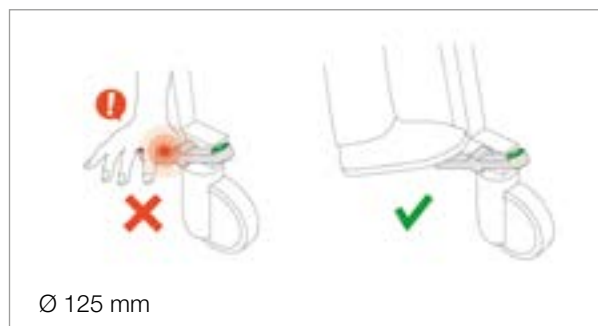


OPTIONS

REPOSE-PIED RÉTRACTABLE

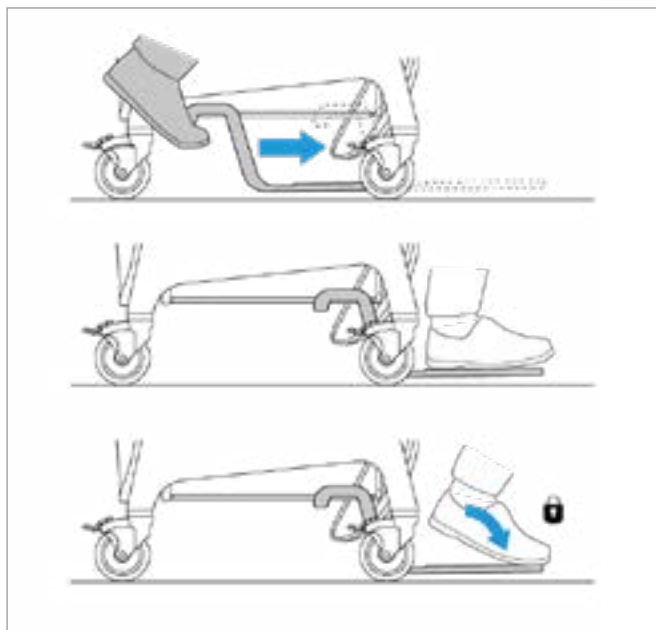



SIÈGE AMOVIBLE

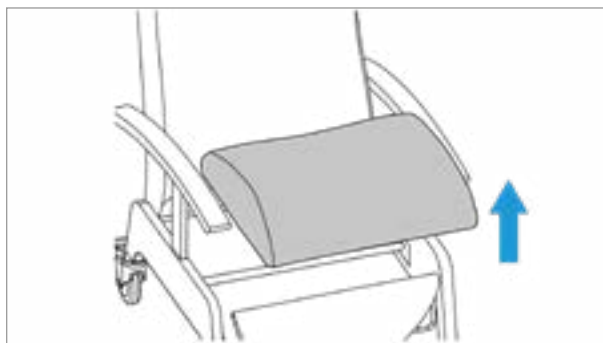


Attention !

Il faut entendre le 'clic' lors de la remise en place du siège!

RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR

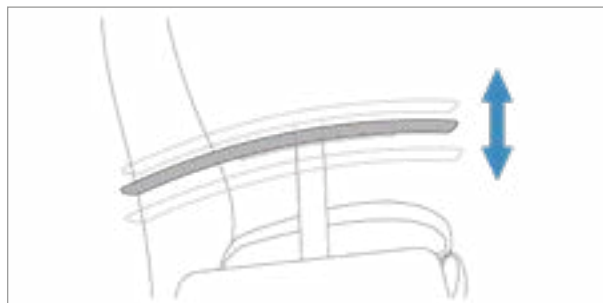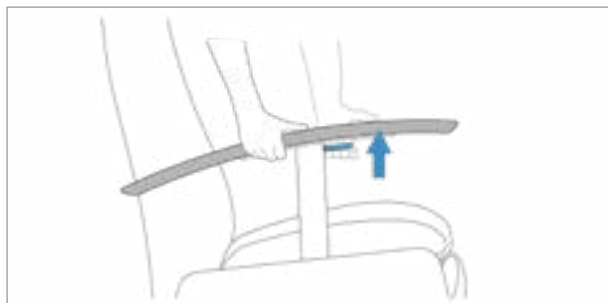


TABLETTE

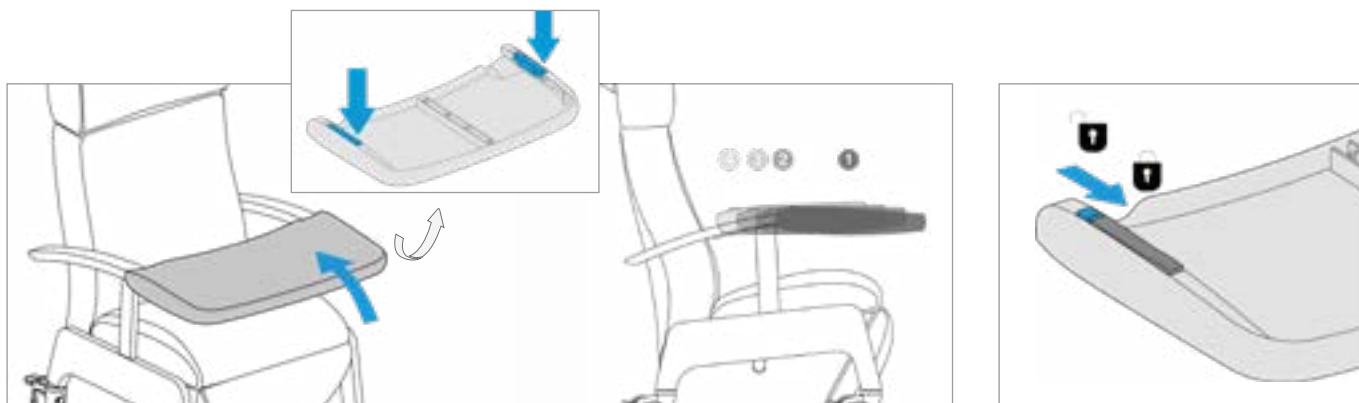


OPTIONS


SELLE D'ADDUCTION

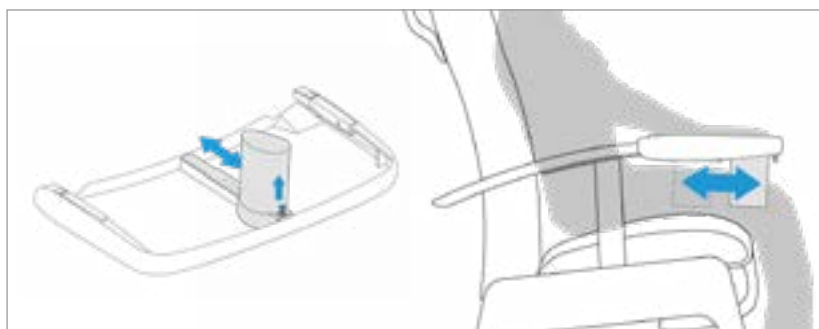


SUPPORT OREILLETTE

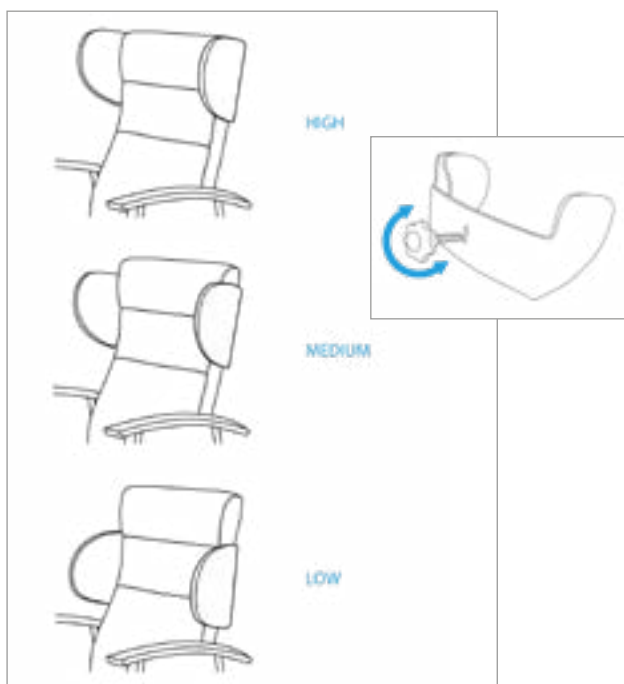

APPUIE-TÊTE AMOVIBLE

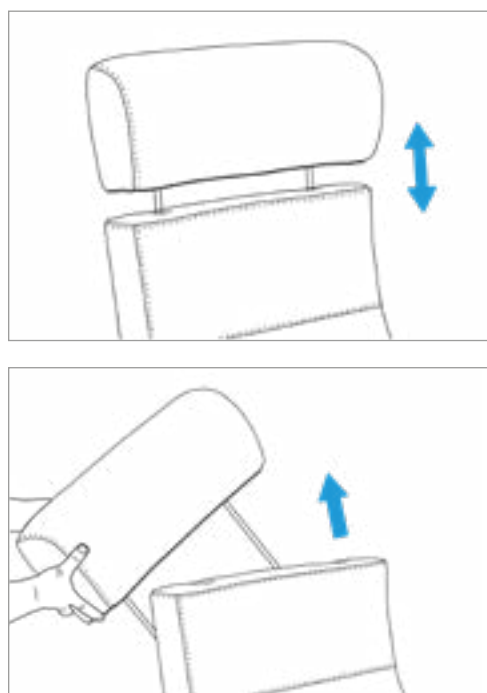

DÉCLARATION CONFORMITÉ CE

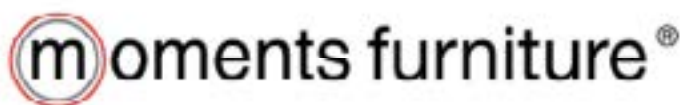

Traduction de la déclaration originale

Déclaration de conformité CE selon l'annexe II.1.A de la directive Machines 2006/42/CE

MOMENTS FURNITURE NV/SA

Deefakkerstraat 2
8770 Ingelmunster
Belgique

Nous, MOMENTS FURNITURE NV/SA, déclarons par la présente que la machine, décrite comme :

Dénomination commerciale :	Fauteuil relax
Fonction :	Fauteuil relax réglable automatiquement
Modèle / Type :	Relax – Laguna
Numéro de série :	VO-XXXXX

répond à toutes les dispositions applicables de la directive Machines 2006/42/CE, telle que modifiée en dernier lieu.

Nous déclarons également que la machine susmentionnée répond aux dispositions applicables de la directive CEM 2014/30/UE, telle que modifiée en dernier lieu ;

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

- EN ISO 12100:2010 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

Rédacteur habilité du dossier technique :

M :	Jean De Tomassen
Fonction :	Senior Product Design Engineer
Adresse :	Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster

Certificat de conformité à la directive Machines 2006/42/CE obtenu auprès de Vincotte sous le Z23-020-009-A

Nom : Peter Saracyn

Lieu: Ingelmunster

Fonction : CEO

Date: 13/03/2023

Signature:





Moments Furniture

Deefakkerstraat 2
8870 Ingelmunster
Belgium
T +32 51 489 258

W2 Moments

Edisonstraat 25
4004 JL Tiel
The Netherlands
T +31 344 619 844

Moments Furniture France

130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
France
T +33 320 545 019

FMB Care

Am Shlinge 8
33154 Salzkotten
Germany
T +49 525 898 090 0

FMB Care.nl

Edisonstraat 25
4004 JL Tiel
The Netherlands
T +31 344 619 844

Moments Furniture Switzerland

Chemin du croset 9
1024 Ecublens
Switzerland
T +41 21 697 05 05

