


# Gebruikershandleiding

*Laguna care relax*

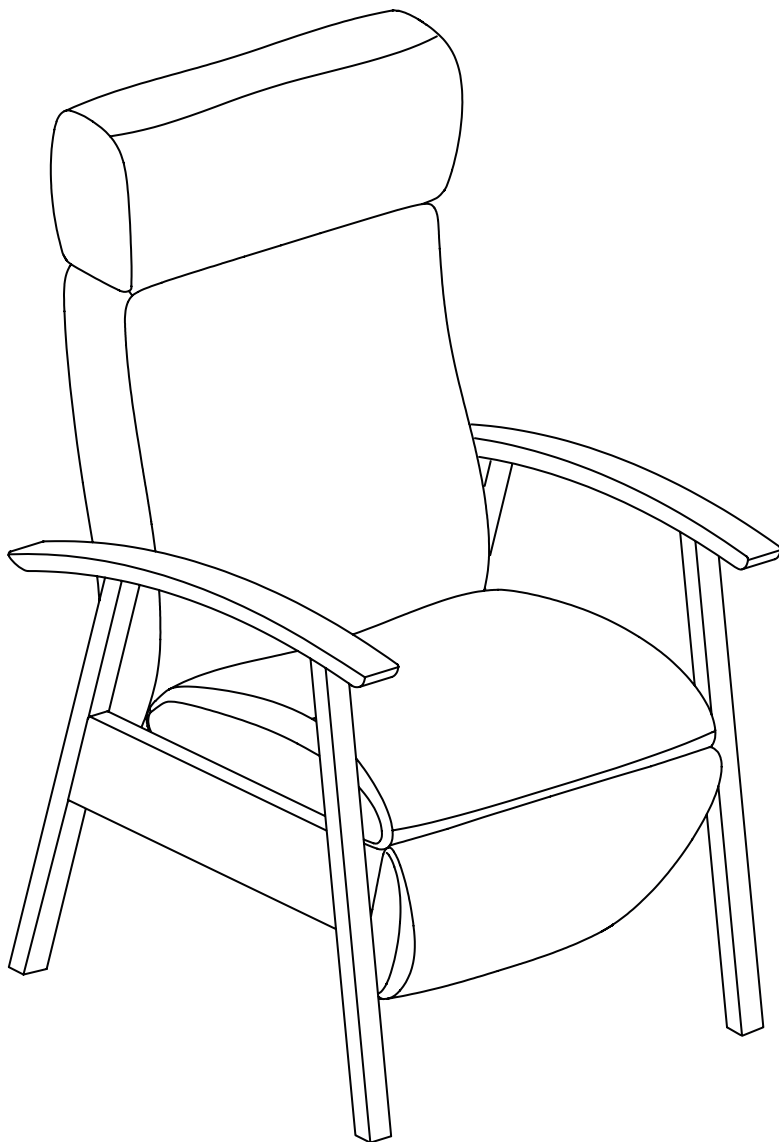

## INLEIDING

Geriatrische relaxzetel met een hele hoge afwerkingsgraad en hoogwaardig comfort. Door de ergonomisch gevormde rug is de relax ideaal voor mensen die langdurig moeten zitten (ouderen die zwaar behoevend zijn). De Laguna heeft talrijke verstelmogelijkheden waardoor de verpleging of huisgenoot kan helpen om de zetel in de gewenste positie te brengen, wanneer de gebruiker hier minder of niet meer toe in staat is.


## DEFECT OF STORINGEN?

Bij defect of storingen kan u steeds contact opnemen met de technische dienst van Moments Furniture op het nummer +32 (0)51 489 258 of via [info@momentsfurniture.com](mailto:info@momentsfurniture.com).

## JUIST GEBRUIK VAN DE RELAXZETEL


Deze instructies zijn bedoeld voor de veiligheid en het comfort van iedereen die deze relaxfauteuil gebruikt.

- \\ De relaxfauteuil is ontworpen voor slechts één persoon.
- \\ Laat voldoende ruimte voor en achter de relaxfauteuil, voordat u de beensteun uittrekt en de rugleuning achterover leunt.
- \\ De beensteun is geen zitgedeelte.
- \\ Voordat u de Laguna verlaat, zorg ervoor dat de ruimte onder de beensteun vrij is, de relax rechtop staat en de voetensteun volledig ingetrokken is. (Zie gebruiksaanwijzing)
- \\ Bij het geklemd raken tussen bewegende onderdelen kan men steeds de tegengestelde beweging uitvoeren.
- \\ Niet geschikt voor buitengebruik.
- \\ De relaxfauteuil is geen medisch hulpmiddel.
- \\ In geval van stilstand steeds de rem gebruiken.
- \\ Het geluidsniveau van de relaxfauteuil bedraagt minder dan 70 decibel.
- \\ Voordat u de relax verlaat, zorg ervoor dat de ruimte onder de beensteun vrij is, de relax rechtop staat en de voetensteun volledig ingetrokken is.
- \\ Maximale werkbelasting (dynamisch): 140 kg.
- \\ Enkel opgeleid personeel mag het onderhoud en herstelling uitvoeren op de verstelmecaniek.
- \\ Verplaats de relaxzetel altijd met 2 personen indien er geen wielen of verplaatsingswielen voorzien zijn.
- \\ Gebruik enkel een droge vod om elektrische componenten te reinigen. Gebruik nooit water bij het reinigen van elektrische componenten.

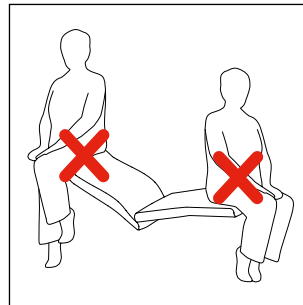

# VERSTELMECHANIEKEN

## QE | ELEKTRISCH VERSTELBARE VERSIE

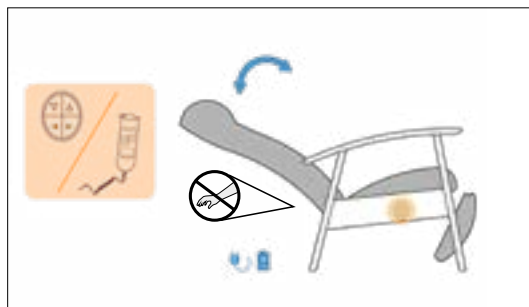

### Opgelet !

Bij het verstellen van de relaxzetel door een zorggever dient de gebruiker de beide armen bovenop de armlegger te positioneren.



### Opgelet !

De batterij moet steeds voldoende opgeladen zijn alvorens de relax te gebruiken. Zo wordt voorkomen dat de batterij leeg loopt wanneer de zetel in relaxstand staat.



### Opgelet !

Plaats geen ledematen tussen de rug en de zijpanden bij het wijzigen van de positie van de rug.

# VERSTELMECHANIEKEN

## QE | STROOMVOORZIENING

### Specificities vaste oplaadbare batterij

Control unit: Power pack (Li-Ion)  
Capacity: 1800 mAh  
Input voltage: 29V DC  
Output voltage: 29 V DC  
Max. voltage: 30 V DC  
Max. output current: 5 A  
Safety: overheating protection - overload protection - overload current switch-off - short-circuit proof - deep-discharge protection - acoustic warning signal  
Protection degree: IP20  
Relative humidity: 20% - 85%  
Ambient temperatures: +10°C to +55°C  
Status display: LED charge status indicator  
    LED lights red: Accu is charging  
    LED lights green: Accu is fully charged  
    Acoustic warning signal for low charge  
Certifications/approvals:  
    EN 60335-1  
    EN 62233  
    EN 55014-1-2  
Energy: 45Wh  
Acoustic signal: ≤23 V  
Charging time: approx. 5 - 8 h (depending on charging state)  
Charging cycles: approx. 300 (depending on usage and operational conditions)

### Specificities Motor

Motor: OKIDRIVE ES2  
Output: 55W  
Capacity: 1800 mAh  
Input voltage: 29 V DC  
Output voltage: 29 V DC


### Veiligheid

- \\ Lekkende batterijen vormen een gevaar voor de gezondheid.
- \\ Lekkende batterijvloeistof kan uw huid of ogen beschadigen. De vloeistof is schadelijk bij aanraken of inslikken. Als u in contact bent gekomen met batterijvloeistof, maak het betreffende gebied dan schoon met water en neem contact op met een arts.
- \\ Als de behuizing of de kabel beschadigd zijn, moet de batterij onmiddellijk worden weggegooid.
- \\ Open of vernietig de batterij niet.
- \\ Soldeer of las niet aan de batterij of in de buurt van de batterij.
- \\ Vermijd contact met water.
- \\ Gebruik alleen door DewertOkin goedgekeurde opladers.


# VERSTELMECHANIEKEN

## EL | ELEKTRISCHE AANSTURING MET GEÏNTEGREERDE HANDBEDIENING

Laguna  
Elektrisch schema  
Jan 2023  
Afstandsbediening inbouw  
AC

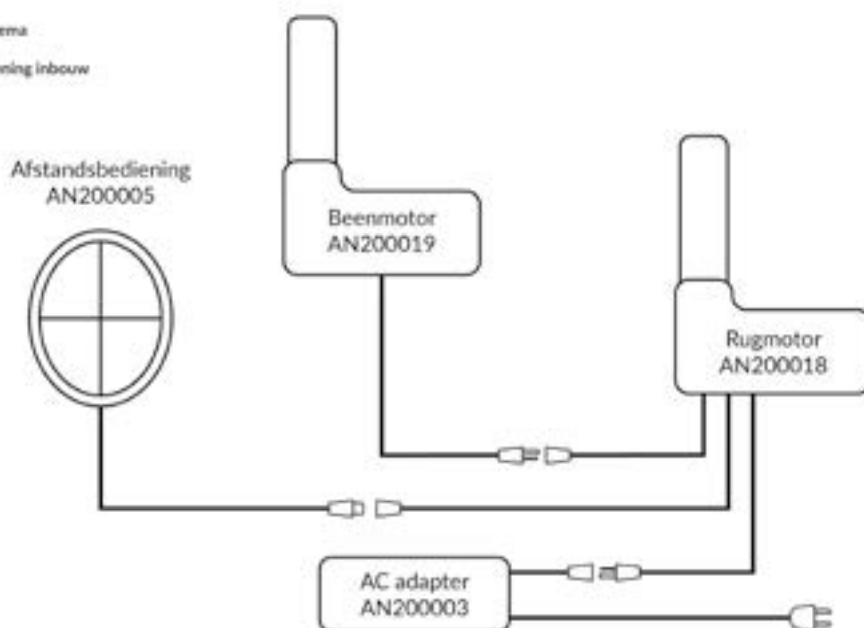



Laguna  
Elektrisch schema  
Jan 2023  
Afstandsbediening inbouw  
Batterij

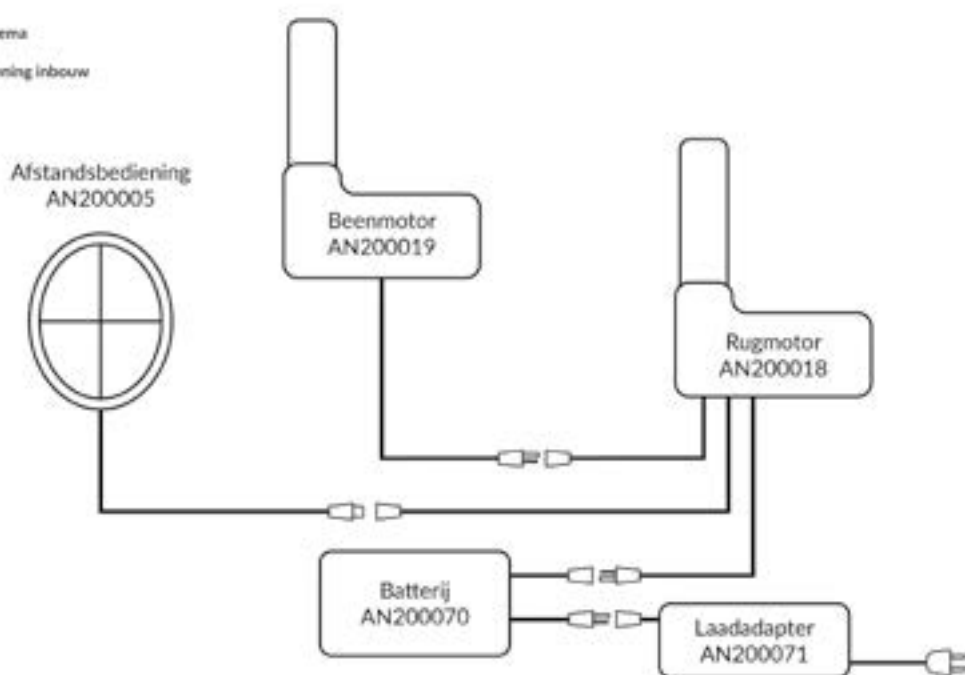

### Opgelet !


Gebruik de motoren maximaal 2 minuten met een rustperiode van 18 minuten erna voor een optimale levensduur van de elektrische verstelmechaniek.

## VOET

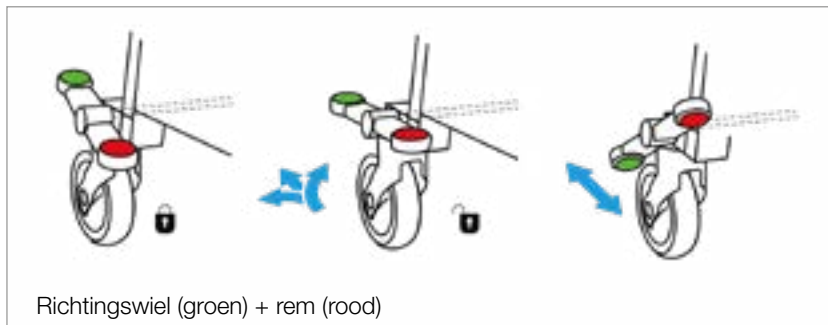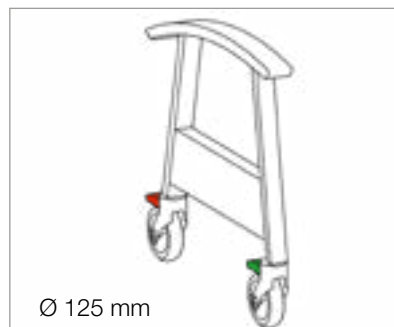


### Opgelet !

In stilstand steeds rem opzetten om onvoorziene verplaatsingen te vermijden. Rem steeds bedienen met de voet.

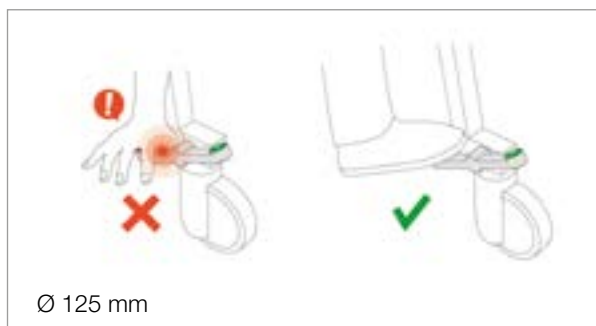


## OPTIES

### UITSCHUIFBARE VOETENSTEUN

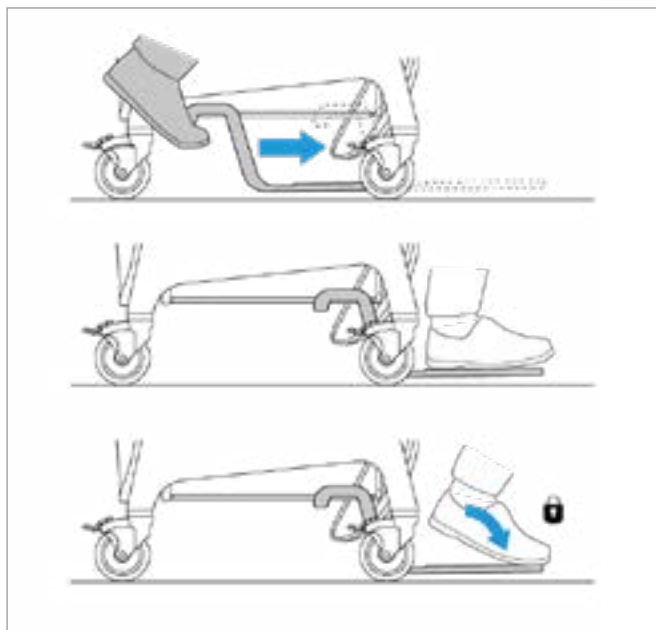



### UITNEEMBARE ZIT

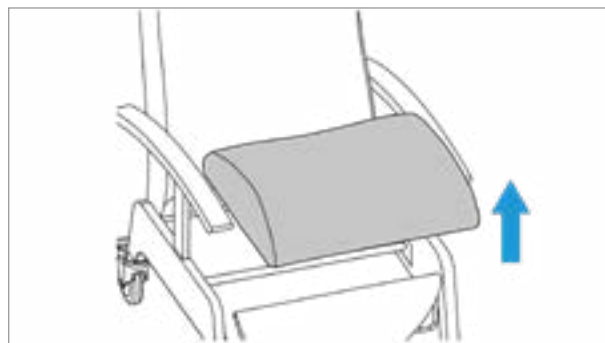


#### Opgelet !

Men moet een klik horen bij het opnieuw bevestigen van de zit.

### ARMLEUNINGSVERSTELLING

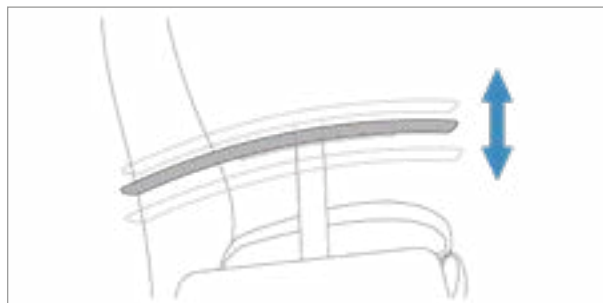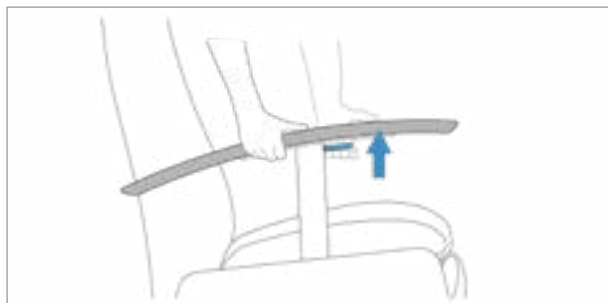


### LEEFTABLET

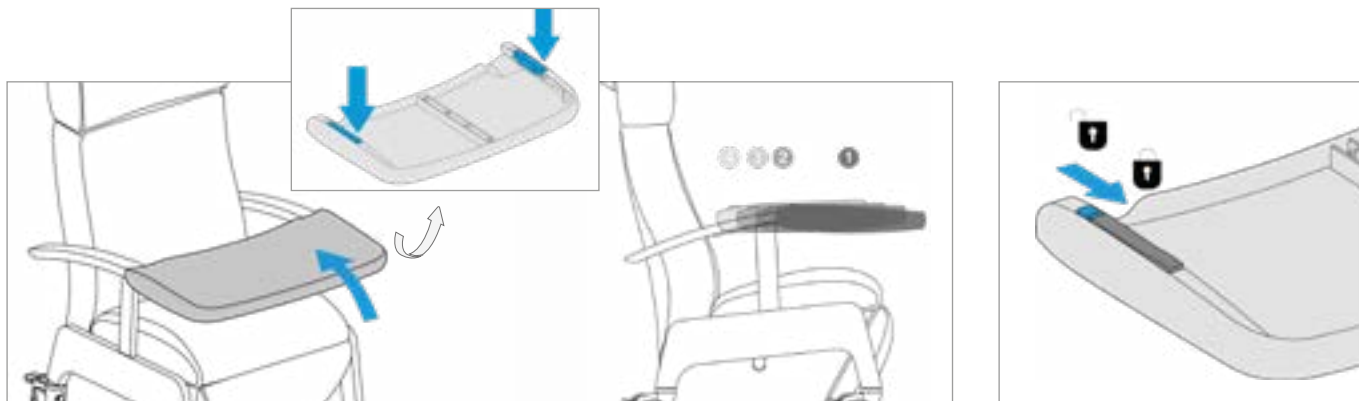


## OPTIES


### ABDUCTIEKLOS

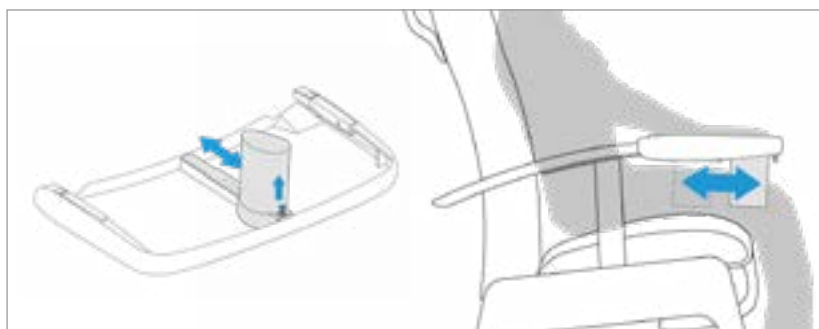


### SCHOUDERSTEUN

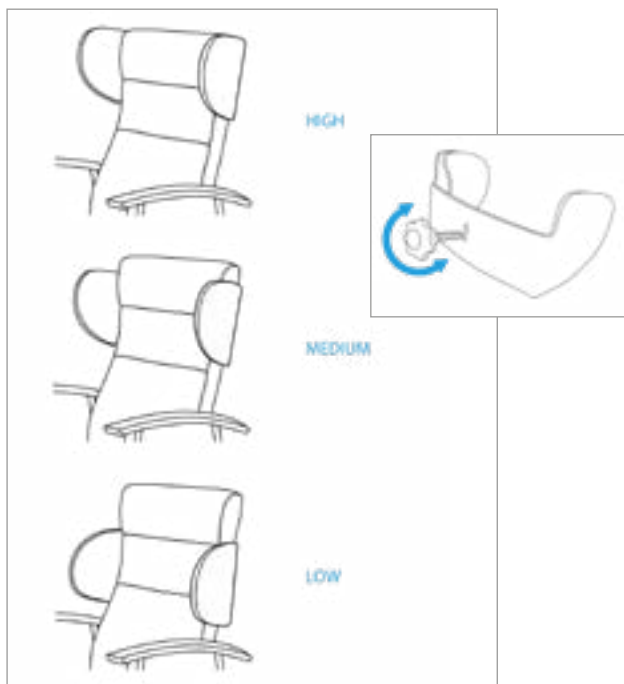

### AFNEEMBAAR HOOFDEINDE

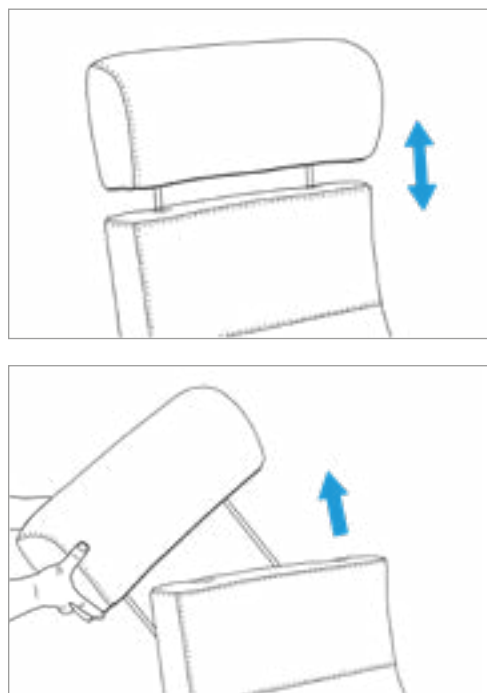

# EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

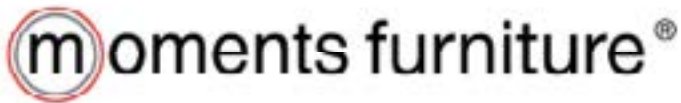

Originale verklaring

## EG-Verklaring van overeenstemming

volgens bijlage II.1.A van de machinerichtlijn 2006/42/EG

### MOMENTS FURNITURE NV

Deefakkerstraat 2  
8770 Ingelmunster  
België

Wij, MOMENTS FURNITURE NV, verklaren hierbij dat de machine, beschreven als:

Handelsbenaming:	Relax zetel
Functie:	Automatisch aanpasbare relax zetel
Model / Type:	Relax – Laguna
Serienummer:	VO-XXXXX

beantwoordt aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zoals laatst gewijzigd.

We verklaren tevens dat de bovverwachte machine beantwoordt aan de toepasselijke bepalingen van de EMC richtlijn 2014/53/EU, zoals laatst gewijzigd.

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

- EN ISO 12100:2010: Veiligheid van Machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risico beoordeling en risicoreductie

Gemachtigde samensteller van het technisch dossier:

M:	Joren De Tervorenman
Functie:	Senior product design engineer
Adres:	Deefakkerstraat 2, B 8770 Ingelmunster

Conformiteitsattest voor de machinerichtlijn 2006/42/EG verkregen bij Vincotte met No. Z23-620-669-A

Naam: Peter Sarrbyn

Plaats: Ingelmunster

Functie: CEO

Datum: 13/03/2023

Handtekening:





---

**Moments Furniture**

Deefakkerstraat 2  
8870 Ingelmunster  
Belgium  
T +32 51 489 258

---

**W2 Moments**

Edisonstraat 25  
4004 JL Tiel  
The Netherlands  
T +31 344 619 844

---

**Moments Furniture France**

130, Boulevard de la Liberté  
59000 Lille  
France  
T +33 320 545 019

---

**FMB Care**

Am Shlinge 8  
33154 Salzkotten  
Germany  
T +49 525 898 090 0

---

**FMB Care.nl**

Edisonstraat 25  
4004 JL Tiel  
The Netherlands  
T +31 344 619 844

---

**Moments Furniture Switzerland**

Chemin du croset 9  
1024 Ecublens  
Switzerland  
T +41 21 697 05 05

