

Formidabel Pro



Lit de soins \

Le lit Formidabel Pro est synonyme de soins traditionnels : un lit solide et robuste qui dépasse sa fonctionnalité. Ce lit de soins est également très facile à entretenir et dispose de deux types de protections latérales différents ('Basic' et 'Solid').

Lit adaptable aux besoins de soins grâce à la grande quantité d'options et d'accessoires.

Qu'est-ce qui rend le lit de soins Formidabel Pro si unique? \

- \ Lit de soins robuste et solide
- \ Réglage Trendelenburg et anti Trendelenburg
- \ Accessible au lève-personne

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

APERÇU FORMIDABEL PRO



01 Protections latérales 'Basic' et 'Solid'

Stabilité et fonctionnalité en cas de besoin. Nous avons réalisé la division des protections latérales 'Solid' de manière asymétrique selon un rapport de 40:60. Cela facilite la montée du résident tout en lui offrant une bonne protection. Les protections latérales monoblocs 'Basic' sont également disponibles.

Plus d'informations sur page 5-6

02 Pédale de frein/système de freinage

Le blocage est effectué par les axes au moyen d'un système de freinage 2 + 2. Le modèle M100 peut en option être équipé d'un système de freinage central à 4 roues. Les pédales de frein sont facilement accessibles de chaque côté.

Plus d'informations sur page 7

03 Réglage de la hauteur

Formidabel Pro offre une plage de réglage allant d'environ 25 cm en position basse à environ 81 cm en position supérieure pour les soins.

04 Butées de matelas

Le dossier et les repose-jambes sont chacun équipés de 2 butées de matelas et assurent ainsi un maintien optimal du matelas dans toutes les positions.

05 Roues/caches roues

Les cache roues élégants à doubles roues de Ø 50 mm optimisent le sentiment de confort et permettent de se déplacer facilement dans la chambre. Les doubles roues de Ø 100 mm offrent une bonne mobilité et maniabilité du lit.

Plus d'informations sur page 7

06 Tête et pied

Plusieurs types de tête et de pied de lit sont disponibles en imitation bois.

Plus d'informations sur page 9

07 Accessoires

À l'extrémité de la tête de lit, il y a deux endroits de fixation pour la potence ou la lampe de lecture. Le lit peut être équipé en fonction des besoins de soins.

Plus d'informations sur page 11


08 Sommier

Le sommier est équipé de lattes métalliques en série faciles d'entretien et optimales pour la circulation de l'air. En option un sommier en matière synthétique avec éléments amovibles.

Plus d'informations sur page 8


Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

FUNCTIONNEMENT & UTILISATION

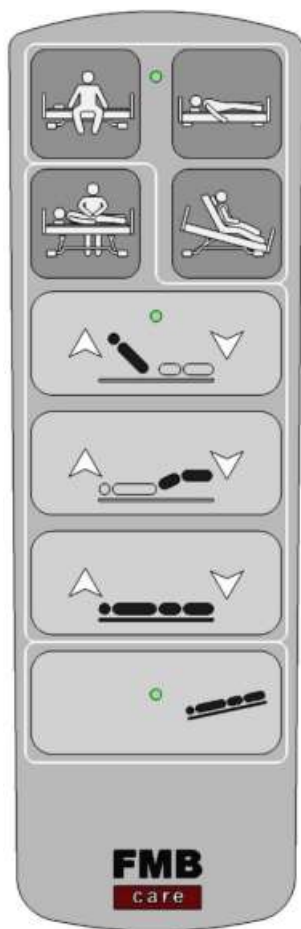


POSITION DE SOMMEIL

La position basse pour dormir à une hauteur de couchage de 25 cm assure un niveau élevé de prévention des chutes.

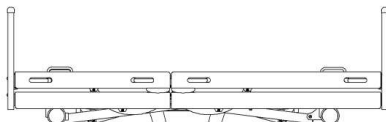


POSITION DE VERTICALISATION

Afin de pouvoir quitter le lit sans effort, le sommier se déplace automatiquement à la hauteur de sortie optimale de 35 cm.

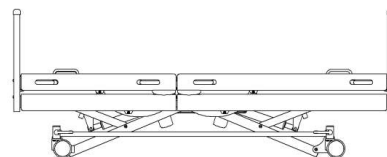


POSITION DE SOINS

Le lit se déplace jusqu'à sa position maximale de 81 cm et les parties du sommier sont positionnées horizontalement.

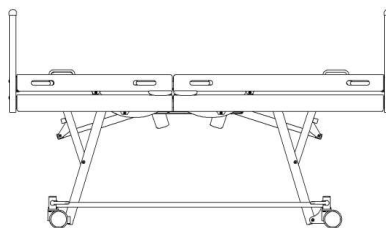

POSITION ASSISE CONFORTABLE

Le dossier et le repose-jambes sont placés en position inclinée, combiné à un mouvement anti-trendelenburg. Le résident peut regarder la télévision ou lire confortablement et les situations de soins quotidiennes sont simplifiées.

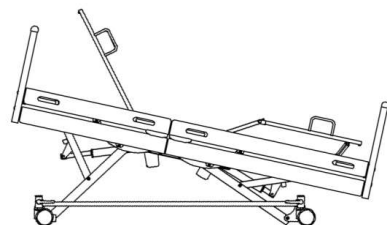


Télécommande

La télécommande du lit de soins Formidabel Pro séduit par ses lignes épurées et ergonomiques. Les symboles assurent une utilisation intuitive et facile des boutons lumineux.



POSITION DE TRENDELENBURG

Cette fonction n'est disponible qu'en mode de soins déverrouillé. Position de Trendelenburg jusqu'à 12°.

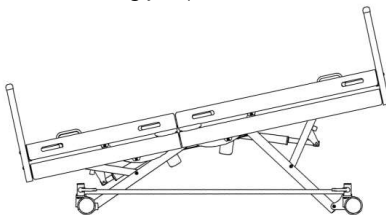

Fonctions de verrouillage/déverrouillage

par insertion latérale de la clé magnétique.

Clé magnétique insérée = le mode résident, le mode de soins et le réglage de Trendelenburg peuvent être activés ou désactivés.




Clé magnétique non insérée = toutes les zones fonctionnelles activées peuvent être utilisées.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

PROTECTION LATÉRALE BASIC

Protection latérale Basic - la protection latérale standard

Les protections latérales Basic sont continues et, lorsqu'elles sont relevées en seulement quelques gestes, elles offrent une protection et une sécurité aux résidents présentant un risque élevé de chute.

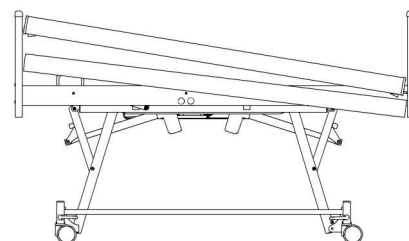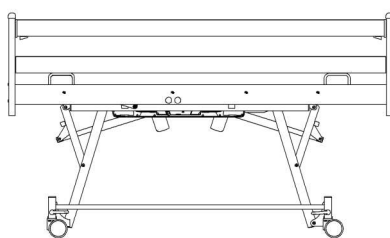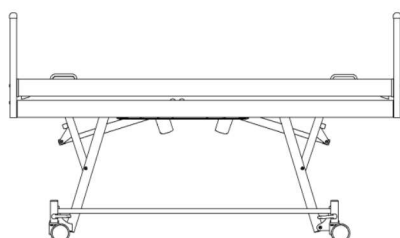





Élévation latérale Basic

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

PROTECTION LATÉRALE SOLID

Protection latérale Solid - stabilité et fonctionnalité en cas de besoin


La division des protections latérales Solid a été réalisée de manière asymétrique selon un rapport de 40:60. Cela facilite grandement la montée et la descente en offrant une bonne protection contre les chutes.

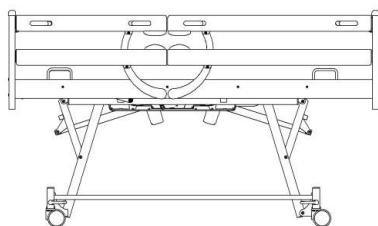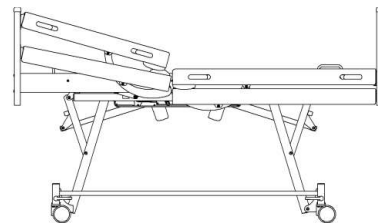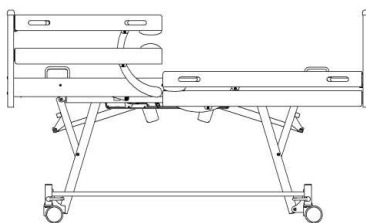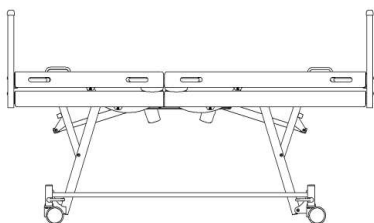

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration


ROUES

Choix entre 3 tailles de roues et 2 systèmes de freinage :

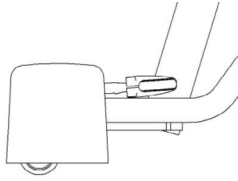


B50

Doubles roues Ø 50 mm avec système de freinage 2+2 et cache roues en matière synthétique ou métallique en option

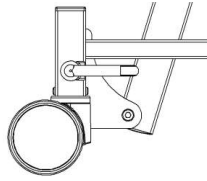

M100

Doubles roues Ø 100 mm avec système de freinage 2+2

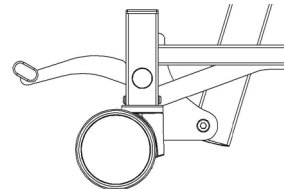

M100


Doubles roues Ø 100 mm avec système de freinage central

CACHES ROUES

Les caches roues élégants pour les doubles roues de Ø 50 mm optimisent le sentiment de confort. Les caches roues en matière synthétique sont fournies en standard pour les largeurs de sommier de 90 et 110 cm et doubles roues de Ø 50 mm. En option en métal pour les largeurs de sommier de 90 et 110 cm et doubles roues de Ø 50 mm.



Cache roue de Ø 50 mm en matière synthétique

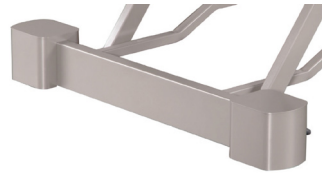

Cache roue de Ø 50 mm en métal

SOMMIER

En standard, le lit de soins est fourni avec un sommier en 4 parties avec des lattes métalliques. En option pour la largeur de sommier de 90 cm avec un revêtement en matière synthétique pour un entretien facile.



Sommier métallique en 4 parties, d'une largeur de 90 ou 110 cm



Sommier en matière synthétique en 4 parties d'une largeur de 90 cm

RALLONGE DU REPOSE-PIEDS

Le sommier peut être étendu jusqu'à 220 cm. En fonction des protections latérales choisies, des kits de rallonges de lit sont disponibles pour les modèles 'Solid' ou 'Basic'. Une longueur de sommier de 210 cm est possible sur demande.

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

TÊTE ET PIEDS

Choisissez parmi 6 options différentes de tête et de pied de lit en bois.



BN



BG



BO



RG



RO



RD



RN



RE








FINITIONS STANDARD

Choisissez parmi différentes couleurs de bois standard pour la tête, le pied et les côtés. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir la bonne finition.

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

MODÈLE							
Formidabel Pro - B50	25-80	209-215/225	103-123	90-110x200-220	>125	oui	★ ★ ★
Formidabel Pro - M100	26-81	209-215/225	103-123	90-110x200-220	>125	oui	★ ★ ★

★ = usage domestique / ★ ★ = usage professionnel / ★ ★ ★ = usage professionnel intensif

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Charge de travail sécurisée: 225 kg

Épaisseur du matelas: ≤15 cm

BATTERIE ET MOTEUR

Puissance en veille	0,5 Watt
Consommation d'énergie en mode veille	4,38 kWh/Année
Connexion électrique	100 - 240 V 1,5 - 0.8 A 50/60 Hz
Classe de protection	II

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉGLAGE

Réglage de la hauteur: 25 - 80 cm pour les roues de Ø 50 mm et 26-81 cm pour les roues de Ø 100 mm.

Durée du réglage de la hauteur: ± 31 secondes (en fonction de la charge)

Réglage Trendelenburg: jusqu'à 12°

Réglage du dossier: 70 ± 5°

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCESSOIRES

FORMIDABEL PRO

Potence avec sangle réglable et poignée	-1	■
Potence avec enrouleur automatique et poignée	-2	■
Lampe de lecture Cultra	-3	■
Cable adapté Timotion pour lampe de lecture Cultra	-4	■
Protection murale frontale	-5	■
Protection murale latérale	-6	■
Système Safer Exit	-7	■
Câblage adapté pour système Safer Exit	-8	■
Kit d'extension Solid L220	-9	■
Kit d'extension Basic L220	-10	■
Élévation latérale Solid <i>(uniquement en combinaison avec la protection latérale Solid)</i>	-11	■
Élévation latérale Basic <i>(uniquement en combinaison avec la protection latérale Basic)</i>	-12	■
Chariot de lit	-13	■
Porte télécommande	-14	■
Porte-sac à urine	-15	■



1 - Potence avec sangle réglable et poignée



2 - Potence avec enrouleur automatique et poignée



3 - Lampe de lecture Cultra



5 - Protection murale frontale



6 - Protection murale latérale

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCESSOIRES



7 - Système Safer Exit



15 - Porte-sac à urine

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-04, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration